



Prélèvement des Urines sur sonde


Utilisation avec le système par aspiration

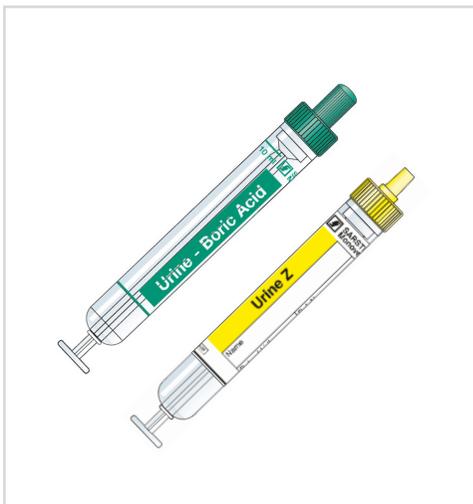


A partir d'une sonde avec système par aspiration et après avoir vérifié l'identité du patient.

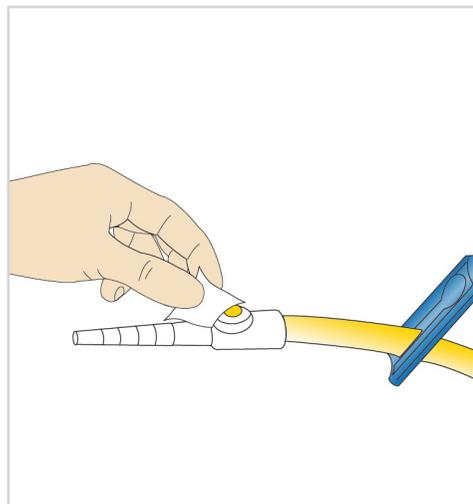

- Clamper la tubulure.
- Vérifier la présence d'urine dans la tubulure.
- Désinfecter le site de prélèvement selon le protocole recommandé.

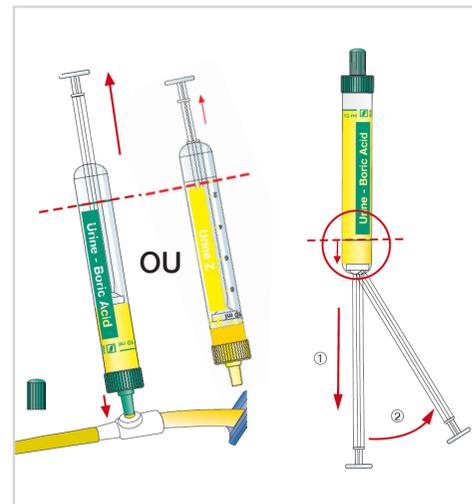

- Retirer le bouchon.
- Percer la membrane avec l'embout Luer de la Monovette® Urine, ou avec une aiguille.
- Tirer doucement le piston jusqu'à atteindre la graduation limite au bout du tube.
- Déconnecter le tube, tirer le piston jusqu'au bout et le casser.
- Replacer le bouchon.

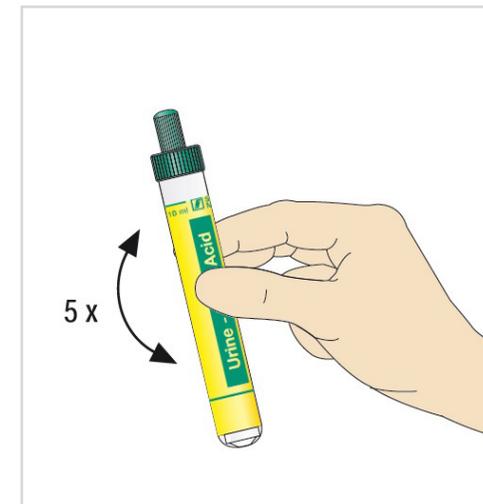


- Vérifier le niveau de remplissage.
- Homogénéiser la Monovette® Urine.
- Étiqueter le tube, puis le transmettre au laboratoire selon les recommandations de l'établissement.

Il n'est pas nécessaire d'homogénéiser le tube jaune.



Ordre de prélèvement des tubes

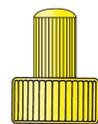

Sans additif



Bactériologie



Veiller à remplir la Monovette® Urine en fonction du niveau de remplissage indiqué sur l'étiquette.

 **SARSTEDT**