

Lié à l'IT [LBM IT 02340 Doser les inhibiteurs de la tyrosine kinase par chromatographie liquide couplée à une détection par spectrométrie de masse](#)

A TRANSMETTRE AU LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE (Tél :02.99.28.42.80 / Fax : 02.99.28.41.84)

Fiche disponible sur le site intranet du pôle (accès via [le manuel de prélèvement](#), paramètre « ibrutinib »)

Etiquette patient

Poids :

Service demandeur

Taille :

Prélèvement = tube hépariné SANS GEL (bouchon vert foncé).

A envoyer dans la glace **au fur et à mesure** des prélèvements !



TELEPHONER systématiquement au laboratoire+++ avant de réaliser la cinétique

Date de début de traitement		/...../.....	
Posologie de l'IMBRUVICA®		mg x/ j	
Médicaments associés			
Motif de la demande		☐ Surveillance ☐ Echec thérapeutique ☐ Effets indésirables	
Date et heure de la dernière administration (avant le T0)		Le/...../..... àh.....min	
DATE des prélèvements		/...../.....	
IBRUT	Heure PRECISE du prélèvement	T0 (résiduelle avant administration)	h.....min
Heure EXACTE de la prise de l'IMBRUVICA®			h.....min
IBRU1	Heure PRECISE du prélèvement	T2h après la prise	h.....min
IBRU2	Heure PRECISE du prélèvement	T4h après la prise	h.....min

Merci de joindre cette feuille au bon de demande de dosage « pharmacologie » (jaune) en cochant la case « ibrutinib » au verso

Cadre réservé à l'enregistrement au laboratoire : Codes par prélèvement : IBRUT (T0), IBRU1 (T1), IBRU2 (T2)
Centrifuger, aliquoter en 2 tubes, congeler -20°C